

FLY

AGO EPICRANICO A FARFALLA DI SICUREZZA

DISPOSITIVO MONOUSO E MONO PAZIENTE IIa

Classificazione: Dispositivo Medico di classe

Conformità: 93/42/CEE e s.m.i.

CANNULA: ACCIAIO SILICONATA

PUNTA: TRIPLICE AFFILATURA

ALETTE: COLORI STANDARD INTERNAZIONALI

TUBO: FLESSIBILE NON COLLABENTE

E ATTACCO LUER/LOCK

APIROGENI, ATOSSICI, FTALATI FREE


CONFEZIONE UNITARIA

Ago epicranico con sistema di sicurezza, apirogeni, atossici. Sterilità garantita a confezione singola integra e non lacerata, utilizzare subito dopo l'apertura, ritirare l'ago subito dopo l'uso, gettare dopo l'uso.

REF	Gauge	Misure	Blister	Box	Cartone
MDBN-21	21G	0,8 x 19 mm	1 pezzo	50 pz	500 pz
MDBN-23	23G	0,6 x 19 mm	1 pezzo	50 pz	500 pz



SISTEMA DI SICUREZZA DELL'AGO POST UTILIZZO

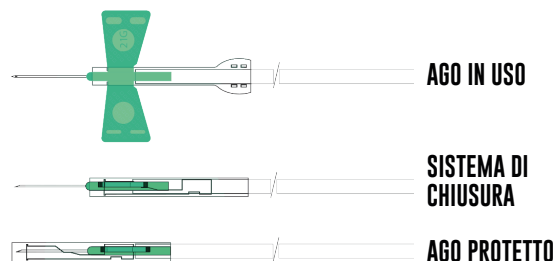

ISTRUZIONI D'USO



1

Rimuovere l'ago dal blister protettivo.



2

Rimuovere il cappuccio protettivo del connettore



3

Ruotare il connettore all'attacco Luer Lock fino alla completa adesione



4

Togliere il cappuccio protettivo dall'ago



5

Alzare le alette e inserire il dispositivo



6

Abbassare le alette fino al contatto con la pelle del paziente*



7

Effettuare il prelievo o infusione



8

Estrarre l'ago dalla vena posizionando pollice e indice come da foto.



9

Con la medesima mano far scorrere l'intero sistema a copertura dell'ago.



10

A conferma della messa in sicurezza si sentirà un "clap".



11

Smaltire il dispositivo secondo le normative vigenti.

* nel caso di infusioni di lunga durata è consigliato coprire le alette con nastro adesivo

MED CONSULTING SRL

Via Revello 38M, Saluzzo (CN) - Italy

+39 0175 518040

P.IVA IT01686980051

info@medconsulting.it

medconsulting.it