

Istruzioni e informazioni del produttore
Camice monouso Codice N61A05

N61A05

Camice monouso impermeabile

PP+PE - 35 g/m²

Non sterile - Dpi III Cat. - Tipo PB6B

Caratteristiche: materiale non tessuto, idropellente traspirante, con polsini a maglia, comodo da usare, alta qualità e protezione.
Utilizzo: ambiente ospedaliero e sala operatoria per la protezione contro virus e batteri e per la manipolazione di prodotti chimici non pericolosi e in ambienti polverosi.

Proprietà

Colore: Blu



EN 14126




EN 13688



EN 13034



TYPE PB6B

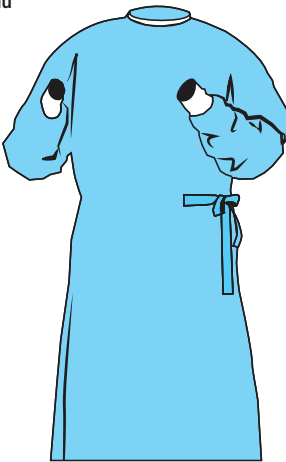

ISTRUZIONI PER L'USO

- Controllare l'imballaggio per assicurarsi che sia integro.
- Aprire la confezione, estrarre il camice di protezione.
- Indossare correttamente il camice sopra l'abbigliamento con allacciatura sul retro.
- Fissare la cintura.
- Il prodotto è monouso, non riutilizzare.

MANTENIMENTO / END USE: si raccomanda la conservazione in luoghi asciutti, lontani dalla luce del sole, a temperatura da 5 a 40 gradi, se mantenuti in queste condizioni la durata del prodotto è valida per 5 anni dopo la produzione.

MONOUSO E RICICLO: i prodotti non contaminati possono essere trattati come rifiuti generici o riciclati. I prodotti contaminati devono essere trattati come rifiuti pericolosi e smaltiti come rifiuti in conformità con le normative nazionali.

ISTRUZIONI SICUREZZA: prima di utilizzare gli indumenti protettivi è necessario controllare eventuali lacerazioni, difetti, sporcizia, buchi e malfunzionamenti, nel caso accadessero queste condizioni, il prodotto non va utilizzato.

La dichiarazione di conformità si trova sul sito:
www.medconsulting.it

SIGNIFICATO DELLA MARCATURA:



Garantisce la libera circolazione dei prodotti e delle merci all'interno della Comunità Economica Europea. Il prodotto con marchio CE è conforme ai requisiti essenziali del regolamento europeo (UE) 2016/425.

L'organismo notificato prescelto per la valutazione della conformità al tipo è: Centro Tessile Cotoniero & Abbigliamento S.p.A. (Centrocot), Piazza Sant'Anna 2, 21052 Busto Arsizio VA Organismo Notificato n. 0624 (Regolamento (UE) 2016/425 per i Dispositivi di Protezione Individuale - modulo B e modulo C2). In accordo al Regolamento UE 2017/745, il prodotto è un DM di classe I.



MED Consulting S.r.l.
Via Revello 38M
12037 Saluzzo (CN)
ITALY

Produttore →

Identificazione del modello di indumento →

Categoria →

Marchio CE →

Norme Europee →

Pittogrammi →

Leggi le istruzioni d'uso →

Linee guida per la cura →



CE 0624

Istruzioni e Informazioni del Fabbricante

LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI

La legislazione vigente (D.L. vo 81:2008) attribuisce al datore di lavoro (utilizzatore) la responsabilità dell'identificazione e della scelta del DPI adeguato al tipo di rischio presente nell'ambiente di lavoro (caratteristiche del DPI e categoria di appartenenza). Pertanto, è opportuno che venga verificata l'idoneità delle caratteristiche del presente modello alle proprie esigenze prima dell'impiego. Il datore di lavoro deve inoltre provvedere ad informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge assicurando, se necessario, una formazione e/o l'addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico del DP. Le presenti istruzioni d'uso del fabbricante devono essere conservate per tutta la durata del DPI in uso.

SCADENZA

Si suggerisce di utilizzare il prodotto entro un periodo di 5 anni dalla data di produzione scritta sull'etichetta.

TRASPORTO E CONSERVAZIONE

Trasportare e conservare il capo nell'imballo originale in luogo fresco e asciutto, non polveroso, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Porre attenzione a non creare pieghe o schiacciamenti.

SMALTIMENTO

Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, altrimenti attendersi alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali.

IMBALLAGGIO

10 pezzi per busta.




Disposable waterproof gown
Code N61A05

PPE Category III

CE 0624 Batch Number

EN 13034:2013+A1:2019 Type PB6B EN 14126:2013+AC:2004

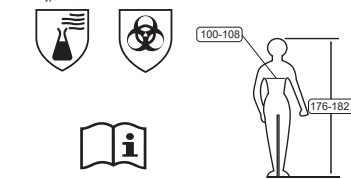

Vestibilità
(EN ISO 13688)



MED Consulting S.r.l.
Via Revello 38M
12037 Saluzzo (CN) ITALY

Istruzioni e informazioni del produttore
Camice da laboratorio monouso Codice N61A05

Prestazioni del tessuto			
Test	Requisiti	Result /Class/Conformity	
Resistenza a penetrazione nel liquido (EN ISO 6530 – EN 13034)	Classe 3: < 1% Classe 2: < 5% Classe 1: < 10%	H ₂ SO ₄ 30%:	Classe 3
		NaOH 10%:	Classe 3
		o-xilene:	Classe 3
		Butan-1-ol:	Classe 3
Repellenza ai liquidi (EN ISO 6530 – EN 13034)	Classe 3: > 95% Classe 2: > 90% Classe 1: > 80%	H ₂ SO ₄ 30%:	Classe 3
		NaOH 10%:	Classe 3
		o-xilene:	Classe 3
		Butan-1-ol:	Classe 3
Resistenza all'abrasione (EN 530 - method 2)	Classe 6	> 2000 cycles	Classe 3
	Classe 5	> 1500 cycles	
	Classe 4	> 1000 cycles	
	Classe 3	> 500 cycles	
	Classe 2	> 100 cycles	
Strappo trapezoidale resistenza (EN ISO 9073-4 - EN 1073-2)	Classe 6	> 150 N	NA
	Classe 5	> 80 N	
	Classe 4	> 40 N	
	Classe 3	> 20 N	
	Classe 2	> 10 N	
Strappo trapezoidale resistenza (EN ISO 9073-4)	Classe 6	> 150 N	Classe 1
	Classe 5	> 100 N	
	Classe 4	> 60 N	
	Classe 3	> 40 N	
	Classe 2	> 20 N	
Resistenza alla trazione (EN ISO 13934-1)	Classe 6	> 1000 N	Classe 1
	Classe 5	> 500 N	
	Classe 4	> 250 N	
	Classe 3	> 100 N	
	Classe 2	> 60 N	
Resistenza alla perforazione (EN 863 - EN 1073-2)	Classe 6	> 250 N	NA
	Classe 5	> 150 N	
	Classe 4	> 100 N	
	Classe 3	> 50 N	
	Classe 2	> 10 N	
Resistenza alla perforazione (EN 863 - EN 13034)	Classe 6	> 250 N	Classe 1
	Classe 5	> 150 N	
	Classe 4	> 100 N	
	Classe 3	> 50 N	
	Classe 2	> 10 N	
Flessione incrinata resistenza (EN 7854)	Classe 6	> 100 000 c.	Classe 6
	Classe 5	> 40 000 c.	
	Classe 4	> 15 000 c.	
	Classe 3	> 5 000 c.	
	Classe 2	> 2 500 c.	
Resistenza al blocco (EN 25978 - EN 1073-2)	Classe 6	> 1 000 c.	NA
	Classe 5	> 1 000 c.	
	Classe 4	> 1 000 c.	
	Classe 3	> 1 000 c.	
	Classe 2	> 1 000 c.	
Accensione e infiammabilità (EN 13274-4 - EN 1073-2)	Classe 6	> 480 min	NA
	Classe 5	> 240 min	
	Classe 4	> 120 min	
	Classe 3	> 60 min	
	Classe 2	> 30 min	
Permeazione di liquidi (EN ISO 6529 - EN 14605)	Classe 6	> 480 min	NA
	Classe 5	> 240 min	
	Classe 4	> 120 min	
	Classe 3	> 60 min	
	Classe 2	> 30 min	
Superficie elettrica resistenza / Decadimento della carica (ANSI/ESD STM 2.1:2013 – test condition EN 1149-1)	Classe 6	> 480 min	NA
	Classe 5	> 240 min	
	Classe 4	> 120 min	
	Classe 3	> 60 min	
	Classe 2	> 30 min	

Prestazioni dell'intero camice				
Test	Requisiti			Risultato/Classe /Conformità
Resistenza alla penetrazione di liquidi Prova getto/spruzzo tipo 3 / 4 (EN ISO 17491-3 / 4 met. B – EN 14605)				NA
Resistenza alla penetrazione di liquidi Prova di spruzzo tipo 6 (EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034)				NA
Resistenza alla penetrazione dell'aerosol Tipo di perdita verso l'interno 5 (EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982)	IL _{82/90}	≤ 30%		NA
Fattore di protezione nominale (EN ISO 13982-2 – EN 1073-2)	Classe	TIL _E %	TIL _A %	Fpn
	3	0,3	0,2	500
	2	3	2	50
	1	30	20	5
Prove pratiche di prestazione (EN 1073-2)				NA
Cuciture: forza (EN ISO 13935-2)	Classe 6	> 500 N	Classe 2	
	Classe 5	> 300 N		
	Classe 4	> 125 N		
	Classe 3	> 75 N		
	Classe 2	> 50 N		
Cuciture: permeazione di liquidi (EN ISO 6529-EN 14605)	Classe 6	> 480 min	NA	
	Classe 5	> 240 min		
	Classe 4	> 120 min		
	Classe 3	> 60 min		
	Classe 2	> 30 min		

EN 14126:2003+AC:2004			
Test	Requisiti		Risultato/Classe /Conformità
Resistenza alla penetrazione di agenti patogeni trasmessi dal sangue - phi-x174 batteriofago (test - ISO 16603/16604)	Classe 6	20 kPa	Classe 6
	Classe 5	14 kPa	
	Classe 4	7 kPa	
	Classe 3	3,5 kPa	
	Classe 2	1,75 kPa	
Resistenza alla penetrazione di agenti infettivi dovuti a meccanica contatto con sostanze contenenti liquidi contaminati - ISO 22610 (test microorganism: staphylococcus aureus)	Classe 6	0 kPa	Classe 6
	Classe 5	t > 75	
	Classe 4	60 < t ≤ 75	
	Classe 3	45 < t ≤ 60	
	Classe 2	30 < t ≤ 45	
Resistenza alla penetrazione di aerosol liquidi contaminati - ISO DIS 22611 (test microorganism: staphylococcus aureus)	Classe 6	15 < t ≤ 30	Classe 6
	Classe 5	≤ 15 min	
	Classe 4	log > 5	
	Classe 3	3 < log ≤ 5	
	Classe 2	1 < log ≤ 3	
Resistenza alla penetrazione di particelle solide contaminate - EN ISO 22612 (test microorganism: spores of Bacillus subtilis)	Classe 6	≤ 1	Classe 3
	Classe 5	1 < log ufc ≤ 2	
	Classe 4	2 < log ufc ≤ 3	
	Classe 3	≤ 1	
	Classe 2	1 < log ufc ≤ 2	

EN ISO 13688:2013		
Test	Requisiti	Risultato/Classe/Conformità
pH (EN 340 – ISO 3071)	3.5 > pH > 9.5	Passa il bianco, il blu, verde, giallo e polsini
Ammine (EN 340 – ISO 3071)		Passa ogni colore